

TERRAGENE®

Cleaning indicator CDWA4/3

Chemdye® splat

クリーニングインジケータ

ウォッシャーディスインフェクター・超音波洗浄装置用

ルーティン洗浄評価インジケータ



洗浄の有効性を容易に確認できる インジケータ

ウォッシャーディスインフェクターの全タイプと35kHz以上の周波数を有する超音波洗浄装置における洗浄の有効性（洗浄装置の稼働性）を確認することが容易にできるインジケータです。

製品情報

Chemdye® CDWAシリーズインジケータは、特別に配合された天然着色成分（タンパク質・炭水化物・脂肪酸・および染料）の人工汚染物を温度安定支持剤により安定固着されています。いかなる条件下の場合においても塗布されている人工汚染物は無毒性が保証されており、適切な洗浄プロセスを問題なくクリアする事により確実に洗い流されます。また、洗い流された人工汚染物も無毒性が保証されています。Chemdye® CDWAシリーズは、洗浄プロセスの結果に影響を与える洗浄4要素トラブル（温度・時間・洗浄液・物理的要素）の検出を可能にしています。また、Chemdye® CDWAシリーズは日常モニタリングを可能にできるように開発された商品になっていますので毎回の洗浄で使用して頂く事をお勧めいたします。



準拠情報

人工汚染物は、ISO/TS15883-5:2005標準附属文書の記述されている洗浄評価テストソイルと比較検証されています。

製品名	汚染色	Annex of standard	レベル
CDWA 3	青色	Annex of standard G	High
CDWA 4	赤色	Annex of standard Q	Very High



Cleaning indicator CDWA4/3

クリーニングインジケーター

出荷単位

- CDWA3 1袋200枚入：重量165g
- CDWA4 1袋200枚入：重量165g

認証・登録

- 準拠ガイドライン：ISO/TS 15883-5:2005
- 品質マネジメントシステム規格：
ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012

使用期限









製造後：5年

レベル表

洗浄評価実施後のChemdye®CDWAシリーズインジケーターの人工汚染物残留度合いにより洗浄4要素トラブルを推測し洗浄装置の修理を実施して下さい。

注意事項

- 保管条件：
温度 10℃～30℃ 湿度 30%～80%
暗所に保管して下さい。
Chemdye®CDWAシリーズインジケーターは、紫外線・消毒剤・ガス・湿気によって評価にムラが出る可能性がありますので出荷時の製品パッケージ内で保管して下さい。
使用后パッケージのジブロックは確実に閉じて下さい。
- 使用条件：
人工汚染物塗布部分に素手で触れないで下さい。
Chemdye®CDWAシリーズインジケーターは、単回使用製品となっています。

	Results reference guide in Thermodisinfection washers(OK/FALL)						
	BASKET ZONE influence results			COVERED ZONE influence results			
Visual results	location inside washer	Water pressure	Mechanical functions (detergent injection pump, spray arms, etc.)	Temperature	Exposure time	detergent (type,dose)	Water quality
Processed and correct 	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	×	×	×	×
	✓	✓	✓	××	××	××	××
	✓	✓	✓	×××	×××	×××	×××
	×	×	×	×××	×××	×××	×××
	×	×	×××	×××	×××	×××	×××
	×××	×××	×××	×××	×××	×××	×××
Unprocessed 	—	—	—	—	—	—	—



NCC株式会社 FIクリーン事業部

〒570-0032 大阪府守口市菊水通4-1-3
TEL.06-6780-4688 FAX.06-6780-4695
オーダー専用 FAX.0263-57-2600

www.ncc-medical.com

担当： _____