



Cleanisept® Wipes Forte

洗浄・除菌ワイプ



esaote, siemensの
エコー診断装置より
除菌洗浄ワイプとして
承認を得られています

アルコールフリーで 超音波診断装置プローブを洗浄・除菌

アルコールフリーで経膈超音波診断装置のプローブ洗浄・除菌を同時に実施できるワイプです。
Cleanisept®Wipes Forteは使いやすい取り出し容器に入っており、一枚一枚取り出しやすくなっています。
使用除菌剤は非アルコール性、非アルデヒド性、非フェノール性です。

製品情報

- 超音波診断装置プローブの洗浄・除菌用ワイプ(アルコールフリー)です。
- MRSAなどの殺真菌性があります。
- DGHM/VAHガイドライン殺ウイルス性に準拠。
- RKI/DVVガイドライン殺ウイルス性に準拠(ポリオウイルス・アデノウイルス・ポリオマウイルス・ワクシニアウイルス及びHBV/HIV/HCVとインフルエンザウイルス)
- EN13704規格の殺芽胞性に準拠。
- 経膈超音波診断装置のプローブの洗浄・除菌を同時に実施できます。

適用範囲

医療器具の洗浄・除菌ガイドライン(欧州)に準拠しています。経膈超音波検査のプローブなどのアルコールに敏感な医療器具の洗浄・除菌に適しています。

使用方法

器具表面が十分湿るまでワイプで拭いて下さい。推薦接触時間拭き取り後の超音波診断装置のプローブを水ですすいで下さい。すすぎに使用する水は、純水又は、RO水をお勧めいたします。

接触時間

		30秒	2分
MRSAなどの殺真菌性・DGHM/VAHガイドライン(器具表面の除菌付着した有機的汚れ洗浄)			●
殺ウイルス性	RKI/DVVガイドライン		●
	ポリオウイルス	●	
	アデノウイルス	●	
	ポリオマウイルス		●
	ワクシニアウイルス	●	
殺芽胞性	EN 13704規格		●

Cleanisept® Wipes Forte

洗浄・除菌ワイプ

出荷単位(最小)

製品番号	内 容	入数/箱
00-235-D100	ディスペンサー1×ワイプ100枚 (ワイプサイズ14cm×20cm)	12個

主成分

100gの溶液中の主成分：

0.2g塩化ジデシルジメチルアンモニウム

0.4gアルキル(C12-16) 塩化ジメチルベンチルアンモニウム

性状

- 外 形：透明、無色、液体
- pH値：pH11

その他注意事項

- 眼に入った場合すぐに十分な水を使って眼を数分間丁寧に洗って下さい。できればコンタクトレンズは外して洗い続けて下さい。
- 地方自治体の取り決めに従って、内容物及び容器を廃棄して下さい。
- 子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- 医療器具の洗浄・除菌を実施する基準Robert Koch研究所(RKI)内の病院衛生委員会及び、感染病防止委員会(KRINKO)と薬品・医療器具の欧州施設(BfArM)の基準に従っています。

※Bundesgesundheitsbl
2012, 55:1244-1310



化学的データ

- Cleanisept® Wipes Forteは、DGHM/VAH.の環境洗浄用ワイプの商品一覧に記載されています。
- 殺ウイルス性消毒剤としてIHOリストに記載されています。
(www.iho-viruzidie-liste.de)
- Cleanisept® Wipes Forteは、93/42/EC医療器具ガイドラインに準拠しています。

Cleanisept® Wipes Forte消毒剤に関する専門家文献

- HamburgのBrill医師
DGHM/VAHガイドラインに沿った表面殺菌剤の効果報告
- GreifswaldのKoburgerl医師
DGHM/VAHガイドラインに沿った表面殺菌剤の効果報告
- BremenのSteinmann医師
2008年RKI/DVVIに沿ったポリオウイルスへの効果に関する報告
2008年RKI/DVVIに沿ったアデノウイルスへの効果に関する報告
2008年RKI/DVVIに沿ったワクシニアウイルスへの効果に関する報告
2008年RKI/DVVIに沿ったSV40/ポリオマウイルスへの効果に関する報告
- SchwerinのDr.H.-P.Werner教授
EN13704規格に準拠した殺孢子性の効果に関する報告

環境情報

- Dr.Schumacher GmbHは新しく、安全で環境に配慮して作っております。厳しい品質規格に準じ、厳守しているので常に高品質が保障されます。
- Dr.Schumacher GmbHはDIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001に準じて認可されています。またヨーロッパ環境マネジメントシステム(EMAS)の確証を受けています。
- Dr.Schumacher GmbHはIHO, VCI, BAH, DGSV及びDGKHのメンバーです。



NCC株式会社 FIクリーン事業部

〒570-0032 大阪府守口市菊水通4-1-3

TEL.06-6780-4688 FAX.06-6780-4695

オーダー専用 FAX.0263-57-2600

www.ncc-medical.com

NCC

担当：