




# Josafe CCI

## CLEANING CHALLENGE INDICATOR

### 洗浄評価インジケータ

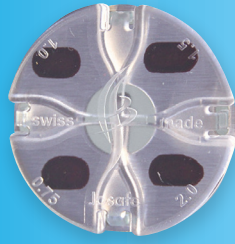

## 従来の洗浄インジケータとは コンセプトが違います

従来の洗浄インジケータは、あくまで指針でしかありませんでした。Josafe CCIは、従来の概念を取り払い一から作り上げてきた第3の洗浄インジケータです。ウォッシャーディスインフェクターの機能から洗浄物のバリデーションまで容易に確認できます。

### コンセプト

- 容易に評価ができる。
- 実際の汚染物と相関性がある。
- 鋼製小物の形状と類似している。
- 各国のガイドラインに準拠している。
- 洗浄機の性能と鋼製小物の清浄度を確認することができる。
- 拭き取りチェッカーと組み合わせることで清浄度保証として使用できるインジケータである。

### 特徴

- 装置の正常運転の確認から器材（繊細な器材のボックスロック）のバリデーション確認まで使用する事が可能。
- PRO1 MICROと組み合わせることにより清浄度保証を行うことが可能。

### 準拠情報

- EN ISO15883-5の洗浄評価用汚染物質に準拠。  
羊のヘパリン添加血液を蒸留水により2倍希釈後の溶液1ml毎に1.5IU硫酸プロタミンを添加。
- DGKH（ドイツ病院衛生協会）：DGSV（ドイツ滅菌事業協会）AKI（機器および調整に関する作業グループ）のWDバリデーションおよび定期的評価のWD洗浄評価方法に準拠。




# Josafe CCI CLEANING CHALLENGE INDICATOR

## 洗浄評価インジケータ

### 構造


- Josafe CCI は、様々な鋼製小物のボックスロックの隙間の平均値を取り、0.75mm・1.0mm・1.5mm・2.0mmの4種類の隙間構造を模しています。
- 各隙間には、仕切りがあり汚染物が簡単に除去できない構造になっています。
- 洗浄バスケットに容易にセットできる構造になっています。
- 拭き取りチェックを容易に行えるように上部カバーは簡単に取り外しができます。

#### 4種類の隙間構造

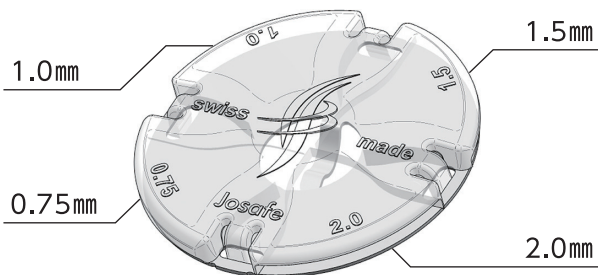





### 仕様

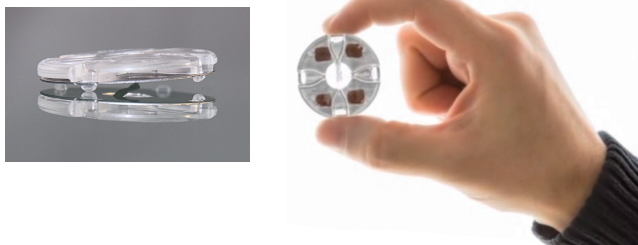使用可能洗浄機	ウォッシャーディスインフェクター 超音波洗浄機
準拠規格	EN ISO 15883-5
保管温度	5℃~30℃
使用期限	製造後2年間
製品番号	J0018
販売単位	1箱(12枚入り)

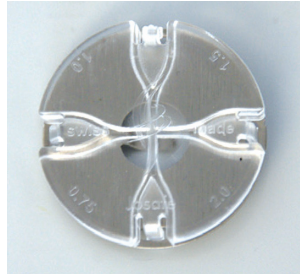

### 洗浄評価レベル

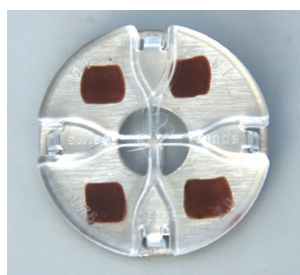	<b>レベル0</b> 完全に除去 良好な洗浄結果
	<b>レベル1</b> 汚染物の枠残留 洗浄に問題あり
	<b>レベル2</b> 汚染物が部分的に残留 洗浄に問題あり
	<b>レベル3</b> 汚染物が完全に残留 洗浄に問題あり

※詳細は、Josefe CCI レベル表をご覧ください。



**NCC株式会社 FIクリーン事業部**

〒570-0032 大阪府守口市菊水通4-1-3  
TEL.06-6780-4688 FAX.06-6780-4695  
オーダー専用 FAX.0263-57-2600

www.ncc-medical.com

担当：