



Thermo® Clear

ベッドパンウォッシャー用リンス剤
サーモ クリアー



ベッドパンウォッシャー装置内の石灰化を防止

Thermo® Clearは、ベッドパンウォッシャーの消毒工程で使用されリンスと石灰防止（装置ヒーター内）に使用できます。また、Thermo® Clearはベースがクエン酸なので、EUの洗剤規定において生物分解性があります。

製品特性

- Thermo® Clearは、ベッドパンウォッシャー大手メーカー全ての装置に適用しています。
- Thermo® Clearは、ベッドパンウォッシャーの石灰化（装置ヒーター内）を防止させます。
- Thermo® Clearは、便器・尿器をシミなく乾燥させます。
- Thermo® Clearは、低発砲性です。

使用において

- 便器・尿器表面や内腔のすべてに洗浄水が行き渡るようにベッドパンウォッシャー専用ラックに確実にセットして下さい。
- Thermo® Clearは、ベッドパンウォッシャーに分注する際30℃以下で分注しないで下さい。

適用量

- 井水使用：1%～3%
- 市水使用：0.1%～0.3%

主成分

クエン酸・腐食防止剤・錯化剤

性状

- 外観：薄黄茶
- pH値：pH2 (0.5%希釈)
- 比重：1.045 (20℃)

出荷単位 (最小)

製品番号	容量	入数/箱
00-127-050	5ℓ縦型ボトル	4本

注意事項

深刻な目の炎症を起こします。保護服や、手袋、目や顔の防護をして下さい。目に入った場合十分な水で丁寧に数分間洗って下さい。できればコンタクトレンズは外して、洗い続けて下さい。もし眼の刺置が続く場合は医師の助言に従って下さい。

認証/登録

欧州連合の医療器具の指標 (93/42 EEC) に順応しています。

環境における注意事項

Dr. Schumacher GmbHは新しく、安全で環境に配慮して作っております。高品質の製品基準に従っておりますので、一定の高品質を保証いたします。Dr. Schumacher GmbHはDIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001に準じて認可されています。またヨーロッパ環境マネジメントシステム (EMAS) の認証を受けています。Dr. Schumacher GmbHはIHO, VCI, BAH, DGVS 及び DGKHのメンバーです。