




洗浄は指針から確信

洗浄評価

オールサポートシステム

オールサポートシステム

弊社が取扱の洗浄評価製品を使用し
弊社スタッフが現場にて洗浄評価を実施いたします

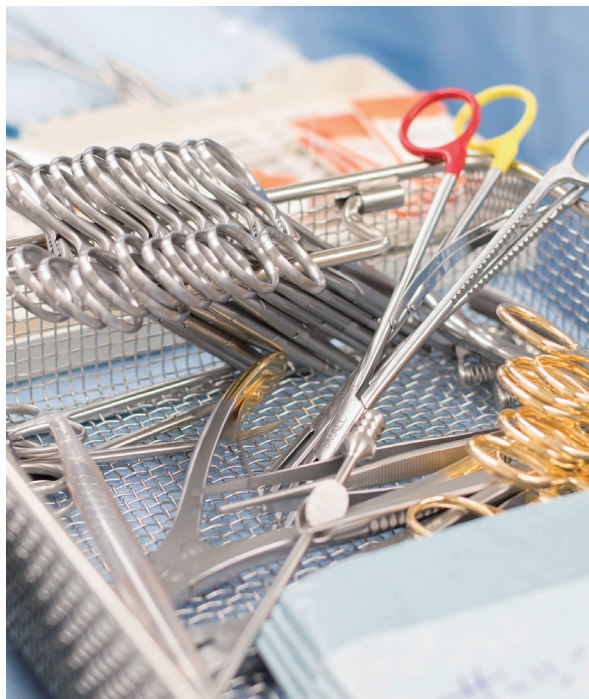

オールサポートシステムとは

弊社営業担当者が現場訪問を行いウォッシャーディスインフェクターなどの洗浄装置の洗浄評価を現場にて実施し洗浄評価報告書を現場様へ提出させていただきます。また、洗浄評価を行った際に判明しました問題点などをご説明させていただくとともに現場様への洗浄スキルアップの為に必要な洗浄勉強会などを開催させて頂くシステムとなっています。




洗浄インジケーター

■ Josafe CCIの特徴

- ENISO15883-5の洗浄評価用汚染物質に準拠
(羊のヘパリン添加血液を蒸留水により2倍希釈後の溶液1ml毎に1.5IU硫酸プロタミンを添加)
- DGKH(ドイツ病院衛生協会) : DGSV(ドイツ滅菌事業協会) : AKI(機器及び調整に関する作業グループ)のWDバリデーションおよび定期的評価のWD洗浄評価方法に準拠
- 装置の正常運転の確認から器材(繊細な器材のBOXロック)のバリデーション確認まで使用する事が可能

■ Josafe CCIの構造


- Josefe CCIは、様々な鋼製小物のボックスロックの隙間の平均値を取り、0.75mm・1.0mm・1.5mm・2.0mmの4種類の隙間構造を模しています
- 各隙間には、仕切りがあり汚染物が簡単に除去できない構造になっています
- 洗浄バスケットに容易にセットできる構造になっています

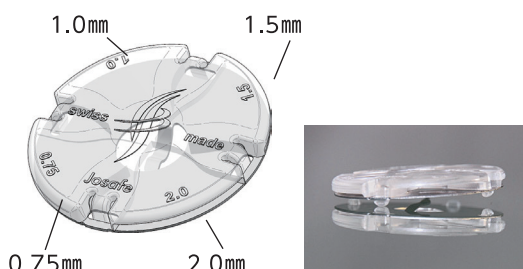

ふき取りチェッカー

■ Pro1 Microの特徴

- Pro1 Micro1本のみで器具の清浄度を確認する事ができます
- カラーチャートによって容易に残留 μg 数を判定する事ができます
- スワブは無菌であらかじめから湿った状態になっています
- 検知試薬は器具表面の残留物に敏感に反応します
- 最短で10分で目視判定を行うことが可能です
- コンパクト設計で複雑な構造の器具にも対応できます
- ヤコブ病などの異常型プリオン病患者に使用した器具の清浄度確認にも使用できます

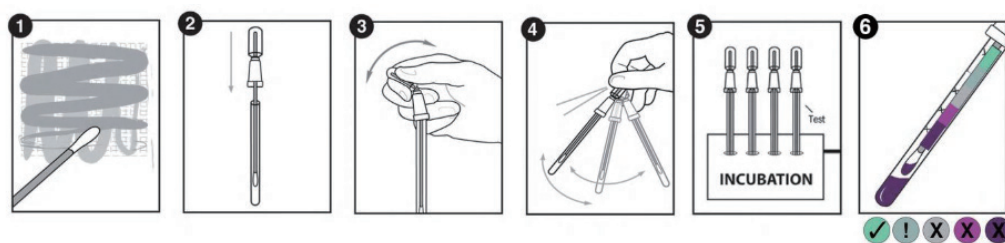



チャレンジデバイスキット

■ チャレンジデバイスキットとは

- 洗浄機が適切に動いているか？ 器材が適切に洗浄されているか？ を評価するためのキットです
- 本キットは、擬似汚染物を利用し、その洗浄性を残留タンパク質量として数値化するものです
- 洗浄後のチャレンジデバイスキットより抽出された残留タンパク質を測定し単独報告書を提出

■ チャレンジデバイスキット内容

- 止血鉗子のボックスロック部に一定量の羊の血液を付着し、一定条件下で保管したデバイスを密閉したガスバリア袋に入れ提供いたします
- 日本医療機器学会「医療現場における滅菌保証に関するガイドライン2010」の付属書B 洗浄効果試験に準じて実施

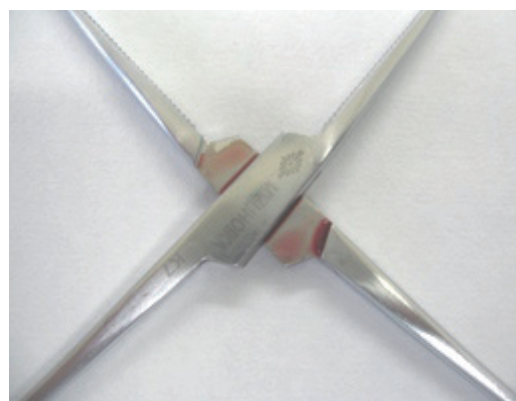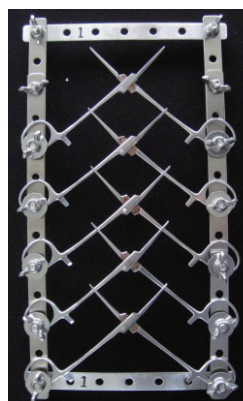

各種洗浄評価タイプ

スタンダードタイプ

洗浄装置2台(WDや超音波洗浄装置etc)1セット

実施内容：半日実施

- Josafe CCI 洗浄ラック段数分(4段ラックなら4枚)
- Pro1 Micro 4本
- 洗浄剤・メンテナンス剤の分注量計測

提出報告書

- オールサポートシステム報告書 2部提出

ギガタイプ

洗浄装置2台(WDや超音波洗浄装置etc)1セット

実施内容：1日実施

- Josafe CCI 洗浄ラック段数分(4段ラックなら4枚)
- Pro1 Micro 4本
- 洗浄剤・メンテナンス剤の分注量計測
- チャレンジデバイスキット 2セット

提出報告書

- オールサポートシステム報告書 2部提出
- チャレンジデバイス洗浄による残留タンパク質抽出(BCA法)結果報告書 2部提出

バリデートタイプ

洗浄装置2台(WDや超音波洗浄装置etc)1セット

実施内容：2日実施

- Josafe CCI 洗浄ラック段数分(4段ラックなら4枚)
- Pro1 Micro 4本
- 洗浄剤・メンテナンス剤の分注量計測
- チャレンジデバイスキット 2セット
- データロガー 洗浄・消毒温度実測 6点
- データロガー スプレー圧力計測 1点

提出報告書

- オールサポートシステム報告書 2部提出
- チャレンジデバイス洗浄による残留タンパク質抽出(BCA法)結果報告書 2部提出
- データロガー 温度実測・圧力計測結果報告書 2部提出

※WDメーカーによって、洗浄剤分注センサーのトラブル発生が考えられる場合は洗浄剤・メンテナンス剤の実測値計測は行う事が出来ません。

※報告書内容等は、弊社営業担当者までお問い合わせください。

標準価格表

洗浄評価タイプ	スタンダードタイプ	ギガタイプ	バリデートタイプ
1セット(2台)	¥50,000	¥70,000	¥100,000
2セット(4台)	¥90,000	¥130,000	¥190,000
3セット(6台)	¥120,000	¥180,000	¥260,000
4セット(8台)	¥140,000	¥220,000	¥330,000

※標準価格表となっていますので、その他オプションサービスなどは弊社営業担当者へご相談下さい。

※本表掲載商品の価格には、消費税は含まれていません。

※本表記載の価格ならびに仕様は2016年3月現在のものです。これらについては予告なしに変更することがあります。



NCC株式会社 FIクリーン事業部

〒570-0032 大阪府守口市菊水通4-1-3
TEL.06-6780-4688 FAX.06-6780-4695
オーダー専用 FAX.0263-57-2600

www.ncc-medical.com

担当：